

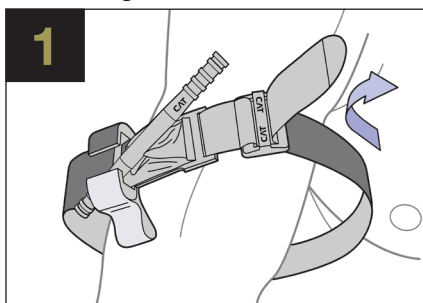
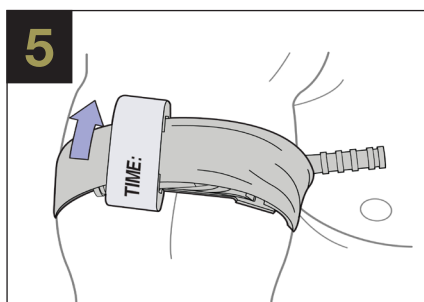
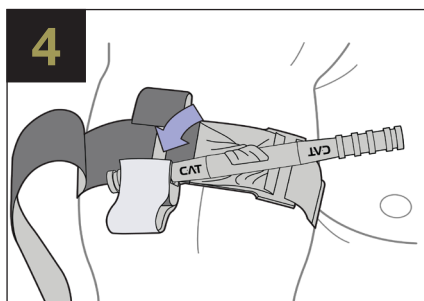


INSTRUÇÕES DE USO

APLICAÇÃO COM DUAS MÃOS

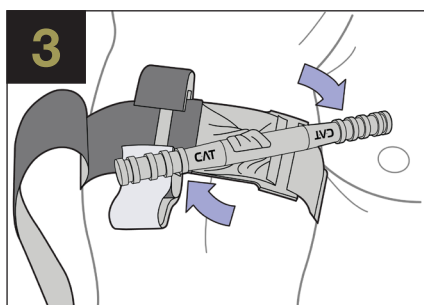


Direcione a tira em volta do membro, passe a lingueta através da fenda da presilha, e posicione o **CAT** 2-3" (5-7 cm) acima do local do sangramento diretamente na pele*

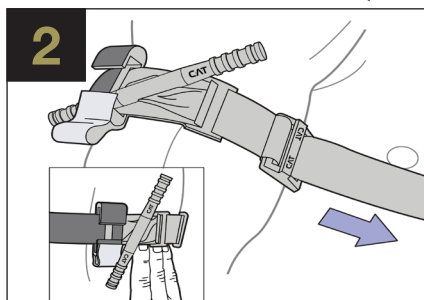

OU

APLICAÇÃO COM UMA MÃO

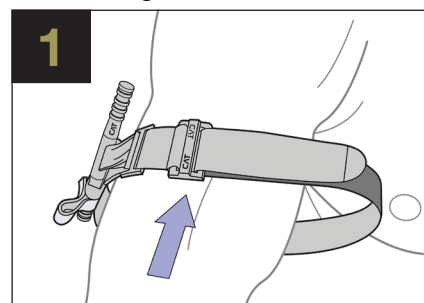

Insira o membro ferido através do laço feito com tira e posicione o **CAT** 2-3" (5-7 cm) acima do local do sangramento diretamente na pele*

Puxe a tira firmemente e prenda em todo o seu caminho em volta do membro, mas não sobre os cliques. A tira deve estar presa o suficiente para que a ponta de três (3) dedos não possam deslizar entre a tira e o membro. Se as pontas de três (3) dedos deslizar sob a tira, reaperte e reafixe.

Gire a haste até parar o sangramento.


Fixe a haste dentro do clipe para prendê-la no local. Verifique se há sangramentos e pulso distal. Se o sangramento não está controlado, ou o pulso distal estiver presente, considere aperto adicional ou aplicar um segundo **CAT** acima e lado a lado ao primeiro.
Reavalie.

Direcione a tira entre os cliques e sobre a haste. Fixe a haste e a tira com a fita TIME. Escreva o tempo de aplicação.


*Se você não está seguro ou não for possível dedicar tempo adicional para examinar de onde o sangramento provém baseado na situação, o **CAT** pode efetivamente ser aplicado sobre a roupa o mais alto possível no braço ou na perna. O **CAT** NÃO pode ser aplicado sobre objetos sólidos dentro nas roupas ou bolsos. Assim que a situação permita, o membro ferido deve ser avaliado e o **CAT** reposicionado 2-3" (5-7 cm) acima do ferimento diretamente sobre a pele.




ARMAZENANDO DO CAT NA CONFIGURAÇÃO DE INICIALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RÁPIDA

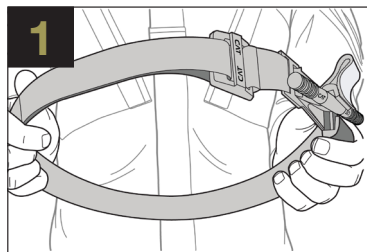

1. Passe a tira através da fenda da fivela. Puxe a tira umas 8" (20 cm) e dobre-a de volta aderindo-a a si mesmo.

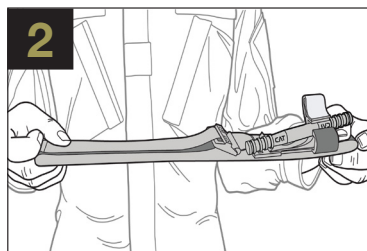

2. Achate o loop formado pela tira. Coloque a fivela no meio da tira dobrada.

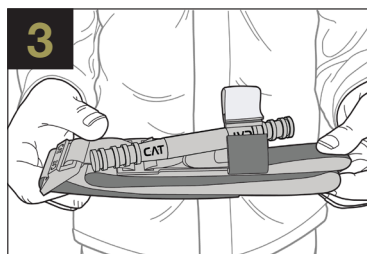

3. Dobre o CAT pela metade colocando a fivela em uma extremidade. O Torniquete está agora pronto para ser colocado no seu Kit médico.

O CAT está pronto para ser colocado no seu KIT.

INSTRUÇÕES DE USO PADRÃO:

O uso pretendido do Combat Application Tourniquet® (CAT) é para obstruir o fluxo sanguíneo de uma extremidade no caso de uma ferida traumática com hemorragia significativa. O benefício clínico do CAT é o controle de um sangramento com risco de vida que resulta em menos perda de sangue. O CAT só deve ser usado conforme orientado pelas diretrizes componentes do serviço militar, profissionais de saúde ou sob a supervisão de um médico; em estrita conformidade com estas instruções de uso. A população-alvo para CAT é qualquer pessoa com sangramento importante nas extremidades superiores ou inferiores, o que representa risco de vida e não pode ser interrompido de outra forma. O CAT tem uma circunferência operacional máxima de 35 pol. (88,9 cm). O uso de qualquer torniquete por mais de 2 horas pode levar a danos neurológicos ou musculares permanentes. Se você não tiver certeza ou não puder dedicar um tempo adicional para examinar de onde está vindo o sangramento com base na situação, o CAT pode ser aplicado com eficácia sobre a roupa o mais alto possível no braço ou na perna. O CAT NÃO deve ser aplicado sobre objetos sólidos dentro da roupa. Assim que a situação permitir, o membro lesionado deve ser avaliado e CAT reposicionado 2"-3" (5-7 cm) acima da lesão diretamente na pele. O CAT deve ser armazenado em local fresco e seco, longe da luz solar direta. A reutilização deste dispositivo descartável pode apresentar risco de infecção. Descarte os CAT usados de acordo com os regulamentos locais para resíduos biomédicos. Comunique todos os incidentes graves ao fabricante e à autoridade reguladora apropriada.

LOT Número de lote		Consulte as instruções de uso	
Fabricante	EC REP Representante autorizado na Comunidade Europeia / União Europeia	Não reutilize	
Manter seco	Afastar-se da luz solar	MD Aparelho médico	UDI Identificador Único de Dispositivo

Combat Application Tourniquet® and CAT are trademarks registered in the United States and certain other countries.

U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253;
8,888,807; 10,016,203;
Canada Patent No. 2,569,550;
EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786;
Israel Patent No. 179769;
Hong Kong Patent No. 1,163,479;
Other Patents Pending

Manufactured by CAT Resources, LLC
483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730
United States of America
803.325.9300



TORNIQUETE



INST-025 REV03 2021-08-03



Distribuição por:
PerSys Medical ent
www.persysmedical.com
1.888.737.7978 | 713.723.6000
5310 Elm St. Houston, TX 77081



TACTICAL PRETO
NSN 6515-01-521-7976



TREINAMENTO AZUL
NSN 6910-01-560-2972



EMS LARANJA
NSN 6515-01-612-7129